

Інструкція по застосуванню медичного виробу.

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед тим, як використовувати
«БРІОМОСС ГІАЛУРОНІК СПРЕЙ».

Вона містить важливу інформацію для пацієнтів.

Будь ласка, збережіть цю інструкцію, щоб прочитати її знову, якщо це буде необхідно.

Медичний виріб

БРІОМОСС ГІАЛУРОНІК СПРЕЙ BRIOMOSS HYALURONIC SPRAY

(Спрей для горла з гіалуроновою кислотою зі смаком лимону)

30 ml (мл)

1. Що таке БРІОМОСС Гіалуронік Спрей?

«БРІОМОСС Гіалуронік Спрей» — це медичний виріб у формі спрею для горла, який під час використання покриває слизову оболонку порожнини рота та горла, створює мукоадгезивну плівку, яка захищає від подразнюючого впливу зовнішніх факторів, таких як бактерії чи віруси. Медичний виріб містить натуральні екстракти ісландського моху, мальви та липи, багаті в'яжучими речовинами, які покривають слизову оболонку ротової порожнини та горла, захищаючи та покриваючи чутливі нервові закінчення (які відповідають за відчуття болю в горлі та реакцію кашлю).

Гіалуронова кислота, що також входить до складу спрею та є одним із активних компонентів утворюваної захисної плівки, додатково інтенсивно зволожує сухі та подразнені слизові оболонки, що приносить додаткове полегшення.

Завдяки перерахованим вище властивостям інгредієнтів, засіб захищає горло, відновлює рівновагу подразненої та сухої слизової оболонки та зменшує неприємні відчуття, пов'язані із сухим кашлем та хрипотою.

«БРІОМОСС Гіалуронік Спрей» безпечний як для дорослих, так і для дітей старше 1 року.

2. Для чого застосовується БРІОМОСС Гіалуронік Спрей?

Медичний виріб — спрей для горла «БРІОМОСС Гіалуронік Спрей» використовується для захисту та зволоження слизової оболонки ротової порожнини та горла. За рахунок захисту та зволоження слизової ротової порожнини та горла, засіб зменшує відчуття сухості, печіння, біль у горлі, особливо під час ковтання. Також зменшує симптоми сухого кашлю та хрипоти.

Рекомендується використовувати для:

- підтримки захисту слизових оболонок при запаленні ротової порожнини та горла різного походження, наприклад фарингіті, тонзиліті або афтозному стоматиті;
- втамування симптомів сухого кашлю та хрипоти;
- для людей, які інтенсивно навантажують голосові зв'язки (вчителі, викладачі, співаки, диктори тощо);
- для людей із сухістю порожнини рота;
- для людей, які піддаються впливу особливо небезпечних зовнішніх факторів, таких як сухе, кондиційоване, холодне або забруднене повітря.

3. БРІОМОСС Гіалуронік Спрей — дозування та спосіб застосування:

Медичний виріб слід використовувати відповідно до інструкції із застосування.

Дозування:

Діти старше 1 року:

1-2 розпилення на задню стінку ротової порожнини кілька разів на день.

Дорослі:

2-3 розпилення на задню стінку ротової порожнини кілька разів на день.

Не використовуйте виріб після закінчення терміну придатності, який зазначено на упаковці.
Не використовуйте виріб при пошкодженні упаковки.

У разі будь-яких сумнівів або коли симптоми зберігаються довше, рекомендується звернутися до лікаря.

Спосіб застосування:

Для перорального застосування. Через вміст у продукті природних рослинних екстрактів, може утворюватися осад на дні пляшки. Тому перед вживанням рекомендується добре струсити пляшку. Після повного використання спрею невелика кількість засобу може залишитися на дні пляшки. Засіб слід розпилювати на задню стінку горла після іжі. З міркувань гігієни та уникнення можливого перенесення інфекції рекомендується використовувати одну пляшку для однієї людини. З міркувань безпеки не слід використовувати аплікатор не за призначенням. Використовувати для дітей старше 1 року. Медичний виріб слід використовувати під наглядом дорослих.

4. Протипоказання:

Підвищена чутливість (алергія) до інгредієнтів продукту.

5. Умови зберігання:

Зберігайте в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °C.

Зберігайте у недоступному для дітей місці.

6. Склад спрею для горла БРЮМОСС Гіалуронік Спрей:

Демінералізована вода, екстракт ісландського моху (*Cetraria islandica*), екстракт мальви (*Alcea rosea*), екстракт липи (*Tilia Cordata*), гіалуронат натрію, лимонний ароматизатор, бензалконіо хлорид, натрію ЕДТА, гліцерин, ксилит.

7. Опис упаковки:

«БРЮМОСС Гіалуронік Спрей» розфасований у пластикову пляшку з розпиловачем, що містить 30 ml (мл) розчину.

Комплект виробу: коробка, пляшка з розпиловачем та етикеткою, інструкція по застосуванню.

Виробник:

Гофарм Сп. з о.о. Сп. к.

Вулиця Гурницька, 21/26, Краків 30-819, Польща.

www.gofarm.pl

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «Органосін ЛТД».

Україна, 04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 8.

Тел. +38 0 (44) 456 99 33.

Уповноважений представник в Україні здійснює функції щодо прийняття претензій від споживачів.



Пояснення символів:

	Виробник
	Термін придатності
	Номер серії
	Температура зберігання
	Прочитайте інструкцію по застосуванню
	Не використовуйте, якщо упаковка пошкоджена

Дата останнього оновлення інструкції щодо використання: Вересень 2020 року

BHMS/IU/09/2020