

## Інструкція із застосування медичного виробу

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед тим, як використовувати **Іаріклін Спрей**.  
Вона містить важливу інформацію для пацієнтів. Будь ласка, збережіть цю інструкцію, щоб прочитати її знову, якщо це буде необхідно.

Медичний виріб

# Іаріклін Спрей Eariclean Spray

(Вушний спрей для гігієни вух)

20 ml (мл)

### 1. Що таке Іаріклін Спрей?

**Іаріклін Спрей** – м'який засіб, призначений для гігієни вух. Застосовується для видалення залишків вушної сірки та сірчаних пробок та запобігання їх утворенню.

Медичний виріб містить:

- диоктил сульфосукцинат натрію, який ефективно видаляє вушну сірку, особливо у дітей;
- екстракт алое вера, природний інгредієнт, відомий своїми зволожуючими властивостями;
- гіалуронат натрію, відповідальний за підтримання належної гідратації оболонок вуха.

Продукт не містить консервантів, парабенів та пропелентів.

### 2. Для чого застосовується Іаріклін Спрей?

Фізіологічно сірка захищає вухо від пилу, сторонніх тіл та інфекцій. Це природний бар'єр, що перешкоджає росту бактерій, вірусів та грибків. Вушна сірка змащує зовнішній слуховий прохід, що захищає шкіру від незначних травм і запобігає потраплянню води у вушний канал. Дрібні сторонні тіла (наприклад, пил), що потрапляють у вухо, з'язуються, а потім видаляються з вуха шляхом самоочищення. Вушна сірка висихає невеликими грудками, які рухаються до периферії, а потім випадають з вушного каналу.

Деякі люди мають вузькі або більш звивисті слухові канали, тому навіть невелика кількість сірки має тенденцію до надлишкового накопичення у вусі, а в інших сірка утворюється в надмірної кількості. Механізм самоочищення може вийти з ладу, і тоді спостерігається схильність до надмірного скупчення вушної сірки у вусі. Схильність до надмірної секреції вушної сірки може бути вродженою і виникати утворення сірчаної пробки у ранньому віці (у немовлят та дітей). Тоді сірка виділяється яскраво, що турбує батьків маленьких дітей - ви можете побачити її у вигляді плям на вушних раковинах.

Ще однією важливою причиною посиленого утворення сірки є механічне подразнення поверхні вушного каналу, наприклад, при використанні слухових апаратів або навушників, або у людей, які використовують ватні палички для чищення вух.

Формування вушних сірчаних пробок призводить до зниження гостроти слуху, шуму у вухах (дзвін або гудіння), закладеність вух, особливо при прийомі ванні (пом'якшена сірка повністю блокує слуховий прохід), неприємні відчуття тріскання та шкрябання у вусі (особливо під час рухів головою), біль у вухах (вушна сірка подразнює і може викликати дерматит вушних каналів) і неприємні відчуття власного голосу (відлуння).

За допомогою **Іаріклін Спрей** слуховий прохід утримується в чистоті, що запобігає накопиченню вушної сірки і можливим ускладненням, наприклад, запалення.

### 3. Іаріклін Спрей – дозування та спосіб застосування

**Іаріклін Спрей** слід застосовувати відповідно до інструкцій із застосування.

У разі виникнення будь-яких питань, проконсультуйтесь зі своїм лікарем або іншим кваліфікованим медичним працівником.

Продукт призначений для дітей старше 1 року та дорослих.

#### Дозування:

Регулярна гігієна вух: користуйтеся 1-2 рази на тиждень.

Видалення вушної сірки та сірчаної пробки: використовувати щодня протягом 3-4 днів.

#### Спосіб застосування:

Перед використанням струсіть флакон **Іаріклін Спрей**, а потім введіть аплікатор у зовнішній вушний канал і натисніть кілька разів, поки не з'явиться рідина. Введіть належну дозу. Зачекайте приблизно одну хвилину і введіть фізіологічний розчин солі у вушний канал, щоб промити вухо. Повторіть цю дію з другим вухом.

Форма спрею забезпечує рівномірне розпилювання та точне дозування.

Після використання промийте аплікатор під проточною водою.

З міркувань гігієни та уникнення можливого перенесення інфекції рекомендується використовувати один флакон для однієї людини.

Задля безпеки не слід використовувати аплікатор не за призначенням.

Не використовуйте пошкоджений аплікатор.

Не використовуйте після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

#### **4. Протипоказання**

Підвищена чутливість (алергія) до інгредієнтів продукту.

#### **5. Попередження:**

Не вводьте вушний аплікатор занадто глибоко у вушний канал, щоб уникнути подразнення чи пошкодження.

Не використовуйте **Іаріклін Спрей** у разі перфорації барабанної перетинки, вушних інфекцій або при застосуванні дренажу вуха.

**Не використовуйте продукт у разі болю у вусі без консультації з лікарем.**

**Медичний виріб для вух. Уникайте контакту з очима.**

Не ковтайте.

#### **6. Умови зберігання:**

Зберігайте в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C.

Зберігайте у недоступному для дітей місці.

Не використовуйте після закінчення терміну придатності, зазначеного на дні пляшки та упаковці.

#### **7. Склад Іаріклін Спрей**

Диоктил сульфосукцинат натрію, екстракт алое, гіалуронат натрію, гліцерин.

#### **8. Опис упаковки**

**Іаріклін Спрей** розфасований у пластиковий флакон з розпиловачем, що містить 20 ml (мл) розчину.

Комплект виробу: коробка, флакон з розпиловачем та етикеткою, інструкція із застосування.



#### **Виробник:**

Гофарм Сп. з о.о. Сп. к.

Вулиця Гурнікув, 21/26, Краків 30-819, Польща.

[www.gofarm.pl](http://www.gofarm.pl)

#### **Уповноважений представник в Україні (імпортер):**

ТОВ «Органосін ЛТД».

Україна, 03022, Київ, вул. Амурська, 6-Л.

Тел. +380 (44) 300 20 46.

Уповноважений представник в Україні (імпортер) здійснює функції щодо прийняття претензій від споживачів.



#### **Пояснення символів:**

	Виробник
	Використати до
	Номер (код) партії
	Температура зберігання
	Прочитайте інструкцію із застосування
	Не використовуйте, якщо упаковка пошкоджена

**Дата останнього перегляду інструкції із застосування: травень 2021 року**

ECS/IU/05/2021

**ORGANOSYN**