

Інструкція із застосування медичного виробу

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед тим, як використовувати **Іаріклін Спрей**. Вона містить важливу інформацію для пацієнтів. Будь ласка, збережіть цю інструкцію, щоб прочитати її знову, якщо це буде необхідно.

Медичний виріб **Іаріклін Спрей** **Eariclean Spray**

(Вушний спрей для гігієни вух)

20 ml (мл)

REF ENT05

1. Що таке Іаріклін Спрей?

Іаріклін Спрей – це виріб, призначений для видалення залишків сірки з вуха та запобігання їх повторної появи. Виріб застосовують як допоміжний засіб для очищення вуха від виділень, що утворюються при зовнішньому отиті, зокрема, ураженнях вушної раковини грибової та бактеріальної етіології, що проявляються свербінням вуха, почервонінням шкіри слухового проходу без набряку або з незначним набряком.

Медичний виріб містить диоктил сульфосукцинат натрію, який ефективно видаляє вушну сірку, особливо у дітей, екстракт алое вера та гіалуронат натрію, що відповідають за підтримку належного зволоження слизової оболонки вуха.

Виріб не містить консервантів, парабенів і пропелентів.

2. Для чого застосовується Іаріклін Спрей?

Фізіологічно сірка захищає вухо від пилу, сторонніх тіл та інфекцій. Це природний бар'єр, що перешкоджає росту бактерій, вірусів та грибів. Вушна сірка змачує зовнішній слуховий прохід, що захищає шкіру від незначних травм і запобігає потраплянню води у вушний канал. Дрібні сторонні тіла (наприклад, пил), що потрапляють у вухо, зв'язуються, а потім видаляються з вуха шляхом самоочищення. Вушна сірка висихає невеликими грудками, які рухаються до периферії, а потім випадають з вушного каналу.

Деякі люди мають вузькі або більш звисисті слухові канали, тому навіть невелика кількість сірки має тенденцію до надлишкового накопичення у вусі, а в інших сірка утворюється в надмірній кількості. Механізм самоочищення може вийти з ладу, і тоді спостерігається схильність до надмірного ступення вушної сірки у вусі. Схильність до надмірної секреції вушної сірки може бути вродженою і викликатися утворення сірчаної пробки у ранньому віці (у немовлят та дітей). Тоді сірка виділяється рясніше, що турбує батьків маленьких дітей – ви можете побачити її у вигляді плям на вушних раковинах.

Ще однією важливою причиною посиленого утворення сірки є механічне подразнення поверхні вушного каналу, наприклад, при використанні слухових апаратів або навушників, або у людей, які використовують ватні палички для чищення вух.

Формування вушних сірчаних пробок призводить до зниження гостроти слуху, шуму у вухах (дзвін або гудіння), закладеності вух, особливо при прийомі ванни (пом'якшена сірка повністю блокує слуховий прохід), неприємного відчуття тріскання та шкрябання у вусі, особливо під час рухів головою, болю у вухах (вушна сірка подразнює і може викликати дерматит вушних каналів), а також неприємного сприйняття власного голосу (відлуння).

Інфекції зовнішнього вуха (вушної раковини) провокуються подрапинами/подразненням епідермісу слухового проходу під час механічного видалення сірки, мацерацією шкіри в результаті частого потрапляння води до зовнішнього слухового проходу або використанням слухових апаратів. При інфекціях зовнішнього вуха (вушної раковини) важливо очищати вухо від будь-яких залишків виділень. Однак такі дії можливі лише після того, як лікар встановить причину запалення зовнішнього вуха (бактерії або гриби).

За допомогою **Іаріклін Спрею** слуховий прохід утримується в чистоті, що запобігає накопиченню вушної сірки і можливим ускладненням (наприклад, запаленню).

3. Дозування та спосіб застосування

Іаріклін Спрей слід застосовувати відповідно до інструкції із застосування.

У разі виникнення будь-яких питань, проконсультуйтеся зі своїм лікарем або іншим кваліфікованим медичним працівником.

Як застосовувати:

• Зовнішній слуховий прохід

Перед використанням струсіть флакон **Іаріклін Спрею**, а потім введіть аплікатор у зовнішній вушний канал і натисніть кілька разів, поки не з'явиться рідина. Введіть належну дозу. Зачекайте приблизно одну хвилину і промійте вушний канал фізіологічним розчином. Повторіть цю дію з другим вухом.

Форма спрею забезпечує рівномірне розпилення та точне дозування.

Після використання промійте аплікатор під проточною водою.

• Вушна раковина

При інфекції зовнішнього вуха (вушної раковини) дозування визначається індивідуально після консультації з лікарем.

Дозування:

Виріб призначений для дорослих та дітей від 1 року.

Регулярна гігієна вух: застосовуйте 1-2 рази на тиждень.

Видалення вушної сірки та сірчаної пробки: застосовуйте щодня протягом 3-4 днів.

Не використовуйте виріб після закінчення терміну придатності, зазначеного на коробці, а також при пошкодженні упаковки.

З міркувань гігієни та уникнення можливої передачі інфекції рекомендується використовувати один виріб для однієї людини.

Для уникнення подразнення або травми не вставляйте вушний аплікатор занадто глибоко в слуховий прохід.

Перед використанням Іаріклін Спрею переконайтеся, що у вас немає перфорації барабанної перетинки, інфекції, болю у вусі або дренажу вуха.

У випадку **інфекції, болю у вусі або інших симптомів, що викликають занепокоєння**, використовувати медичний виріб можна **тільки після консультації з лікарем**.

У кожному з описаних вище випадків необхідно проконсультуватися з лікарем, оскільки застосування виробу може мати негативний вплив на здоров'я.

Медичний виріб для вух. Уникайте контакту з очима.

Не використовуйте цей виріб для носа. Не ковтайте виріб.

4. Протипоказання

Підвищена чутливість (алергія) до інгредієнтів продукту.

5. Умови зберігання:

Зберігайте в оригінальній упаковці при кімнатній температурі 15-25 °С.

Зберігайте у недоступному для дітей місці.

Не викидайте медичний виріб у контейнери для побутових відходів. Запитайте свого фармацевта, що робити з медичним виробом після закінчення терміну придатності. Це допоможе захистити довкілля.

6. Склад

Диоктил сульфосукцинат натрію, екстракт алое вера, гіалуронат натрію, гліцерин.

7. Опис упаковки

Іаріклін Спрей розфасований у пластиковий флакон з розпилювачем, що містить 20 ml (мл) розчину.

Комплект виробу: коробочка, флакон з розпилювачем, інструкція із застосування.

Іаріклін Спрей є медичним виробом.



Виробник: Гофарм Сп. з о.о. Сп. к.

Адреса. Вулиця Гурників, 21/26, Краків 30-819, Польща.

www.gofarm.pl

Уповноважений представник в Україні (імпортер): ТОВ «ОРГАНОСІН ЛТД».

Адреса. Україна, 03022, м. Київ, вул. Амурська, 6-Л.

Тел. +38 0 (44) 300 20 46

www.organosin.com.ua

Уповноважений представник в Україні здійснює функції щодо прийняття претензій від споживачів.

Пояснення символів:

	Виробник
	Термін придатності
	Номер серії
	Ознайомтесь з інструкцією із застосування
	Температура зберігання
	Не використовуйте, якщо упаковка пошкоджена
	Каталожний номер

Дата останнього перегляду інструкції із застосування:

Липень 2024 року

ECS/IU/07/2024



1434



UKTR116

ORGANOSIN